



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Cara Print 4.0 pro をご使用中のお客様各位

2025 年 6 月 9 日

クルツァージャパン株式会社

カーラプリント 4.0 プロのファームウェアのアップデートのお願い

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、医療機器のサイバーセキュリティ対策強化の一環から、カーラプリント 4.0 プロのファームウェアのアップデートを行う事となりました。

皆様に現在使用して頂いているプリンターファームウェア (96.7.0 以前のもの)、CAM ソフトウェア (バージョン 3.0.3 以前のもの) は今後使用できなくなります。

お忙しい所大変恐縮ではございますが、**6 月 30 日 (月) までに更新作業を実施**していただけますようお願い申し上げます。

尚、最新版は以下の通りとなります。リンクよりダウンロードしてください。

- ・プリンターファームウェア : 97.0.0+マテリアルライブラリ 1.0.0

<https://drive.google.com/file/d/1Sv8-vWo8kKLtz5RAGLNqpVn8Wtikeo90/view?usp=sharing>

- ・CAM ソフトウェア : バージョン 4.0.0

<https://drive.google.com/file/d/10qH6V0a58j0kgEpQE7pdqfoDGQwFmSCg/view?usp=sharing>

- ・サポートピンファイル

<https://drive.google.com/file/d/1ufk1s0K-en-q5oQwa0iTHMSPbUltC0rp/view?usp=sharing>



更新手順は以下の通りです。

手順書をダウンロード頂くと、図入りでより詳しく説明されております。

https://drive.google.com/file/d/1lt5CNfzvvhkMmV9MZ_hPwSjdRCJaOLCj/view?usp=sharing

※現在のプリンターのファームウェアバージョンをご確認ください。

FW92、93 をご使用の方はまず FW96.2.4 にアップデートする必要があります。

1. クルツァーホームページまたはメールのリンクより最新版のファームウェア、マテリアルライブラリ、CAM ソフトウェアをダウンロードしてください。

2. ダウンロードしたファイルを解凍し、USB メモリのルートディレクトリ上に保存してください（フォルダ内に保存しない）。

3. プリンターの設定画面からリセットを選択し「工場出荷時の状態にリセット」をタップし、プリンターを再起動させます。

再起動後、言語設定を行ってください。

4. ファームウェアファイルを保存した USB メモ리를プリンターに差し込み、最新版 97.0.0 のアップデート用ファイルをタップしてください。

5. 最新版のインストールが完了したら、ホーム画面から USB 転送をタップし、差し込んだ USB メモリの名前をタップしてください。

マテリアルの更新をタップし、マテリアルライブラリのインストールを実施します。

注意：ファームウェアとマテリアルライブラリは必ず同じリージョンである必要があります。使用できるインクが異なります。

6. 次に最新版の Cara Print CAM を PC にインストールしてください。

7. 最新版 CAM ファームウェアの初期はライブラリファイルがインストールされていません。「ライブラリがありません」というポップアップが出ます。

設定＜オプションから「インストールライブラリアップデート」をクリックしてください。



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

8. サポートピンのライブラリファイル(Zip ファイル)を選択し、更新します。更新が成功したら、CAM ソフトウェアを再起動させ完了となります。

ご不明な点がございましたら、弊社スタッフまでお問い合わせください。
何卒、よろしくお願い申し上げます。